

# Manual de instrucciones CA355L



## POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LOS ASIENTOS DE DUCHA

Guarde estas instrucciones, pueden serle de utilidad más adelante. Indicaciones Sillas fabricadas en aluminio. Asiento y respaldo de plástico, de formas redondeadas, sin cantos agresivos. Son de altura graduable.

**Advertencias de seguridad:** Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y utilizar su silla.

- Utilice la silla solamente sobre terrenos planos y firmes.
- El peso máximo del usuario es de 100 kg.
- Antes de sentarse, asegúrese que la silla está bien montada y que los pasadores de seguridad están correctamente colocados. Riesgo de accidente • Utilice la silla solo si está en perfectas condiciones.
- Utilice solo recambios originales.
- No haga ningún cambio estructural en la silla.
- Asegúrese que la silla descansa sobre sus cuatro patas en el suelo de forma segura

### Montaje

- El modelo de taburete CA355L viene pre-montado. Por lo que para terminar de montarlo solo tiene que introducir las patas por los los orificios de la parte inferior del tabuete .
- Presione los pivotes hacia dentro.
- Mueva la pata a la altura deseada.
- Fije la pata comprobando que el pivote sale hacia fuera haciendo “clic” y que queda fijo.
- Finalmente colocar los reposabrazos se por los orificios laterales comprobando que el pivote sale hacia fuera haciendo “clic” y que queda fijo.