

Um Ultherapy®

MERZ AESTHETICS®

STRAFFE HAUT OHNE OP



**Eine revolutionäre
nicht-invasive
Hautstraffungs-Technologie**

Ultherapy® Patientin und Model.

BE REVOLUTIONARY

ERFAHREN SIE, WIE ULTHERAPY® WIRKT UND LIFTET



Die bewährte Ultraschalltechnologie von Ultherapy® erzeugt einen stimulierenden Effekt unter der Haut.


Mit mikrofokussiertem Ultraschall wird gezielt eine Hitzeeinwirkung in den tiefen Hautschichten erzeugt und die körpereigene Produktion von frischem, neuen Kollagen angeregt.

Da Kollagen für die Straffung der Haut verantwortlich ist, macht Ultherapy® eine natürliche Hautstraffung ohne Operation möglich.



Vorher:

Die Kollagen- und Elastinfasern der Haut sind geschwächt. Dadurch ist die Haut dünner - es entstehen Falten und Schlaffheit

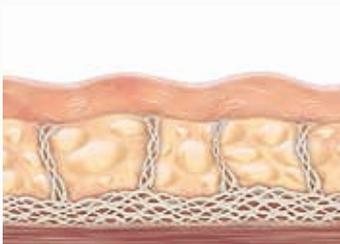


Behandlung mit Ultherapy®:

Die Ultraschallenergie wirkt in den verschiedenen Tiefen der Hautschichten bei 4.5 mm, 3.0 mm, 1.5 mm



Nachher:

Straffungseffekt nach ca. 6 Monaten

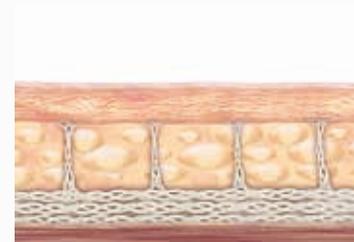


DIE KRAFT DES MIKROFOKUSSIERTEN ULTRASCHALLS



Anders als Laser- oder Radio-Frequenzgeräte, welche die Hitze von außen nach innen bringen müssen, wirkt Ultherapy® von innen nach außen, um die Haut zu straffen und zu liften. Mikrofokussierte Ultraschall-Energie passiert das Hautgewebe schadlos und wirkt in einer Tiefe von 1,5 mm bis zu 4,5 mm. Dies ist die Gewebeschicht, die typischerweise bei einem chirurgischen Facelift gestrafft wird.¹⁻²

Die Haut reagiert auf diesen Stimulus mit der Neubildung von frischem Kollagen und Elastin. Die endgültigen Ergebnisse werden über einen Zeitraum von 3-6 Monaten sichtbar und begeistern durch ein jüngeres und konturiertes Aussehen.¹⁻²

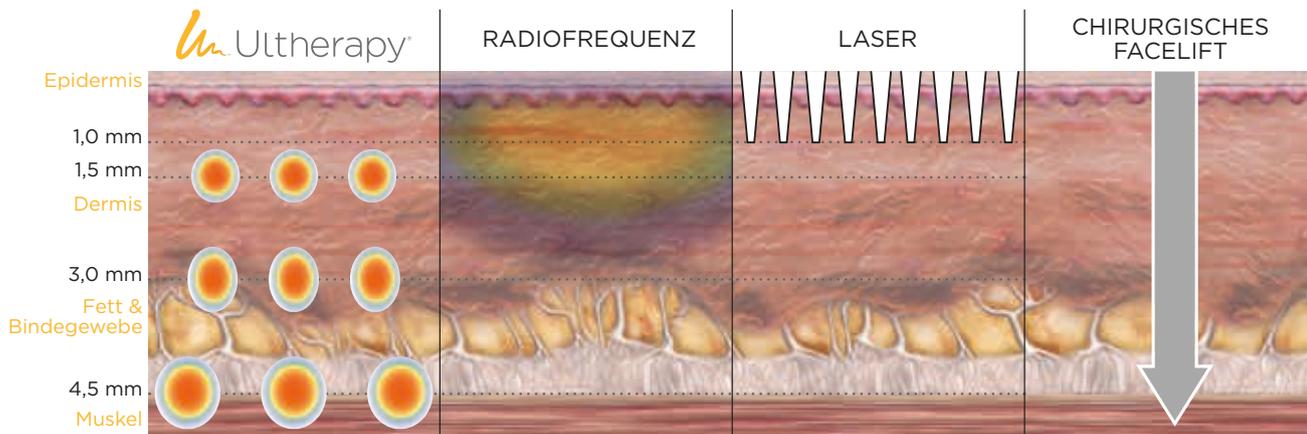

Vergleich der Einwirktiefe und Energieverteilung²

DER HAUTALTERUNGSPROZESS





Ultherapy® Patientin und Model.

Mit dem Alter lässt der Kollagen- und Elastingehalt der Haut nach – das Gewebe wird zunehmend schlaff und verliert an Festigkeit.

Typische Anzeichen sind beispielsweise:

- Abgesunkene Augenbrauen
- Faltenbildung im Gesicht oder auf dem Dekolleté
- Konturenverluste am Kinn oder Hals
- Erschlaffte Haut im Gesicht

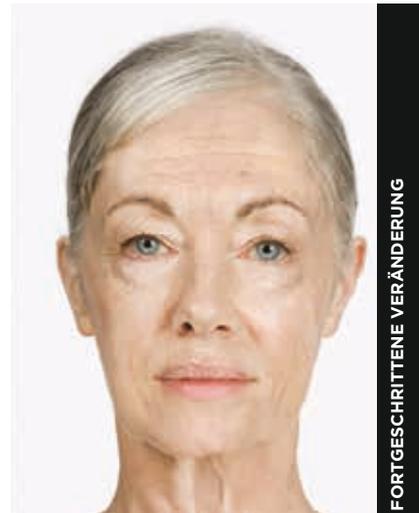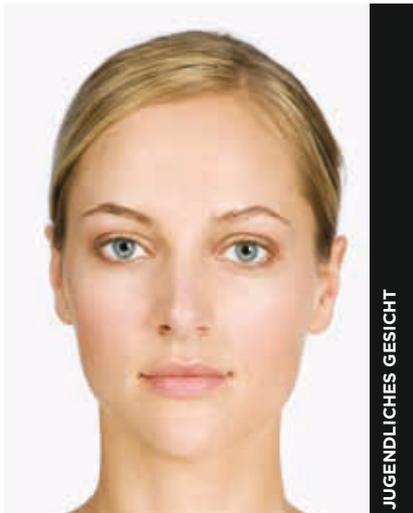


WECKEN SIE IHR KOLLAGEN



Kollagen ist ein natürliches, körpereigenes Protein, welches für das jugendliche Erscheinungsbild der Haut verantwortlich ist. Es hält die Haut straff und elastisch.

Während wir altern, verliert das Kollagen an Elastizität. Ultherapy® setzt genau hier an und „repariert“ die Haut - es regt sie an, wieder neues Kollagen zu produzieren.

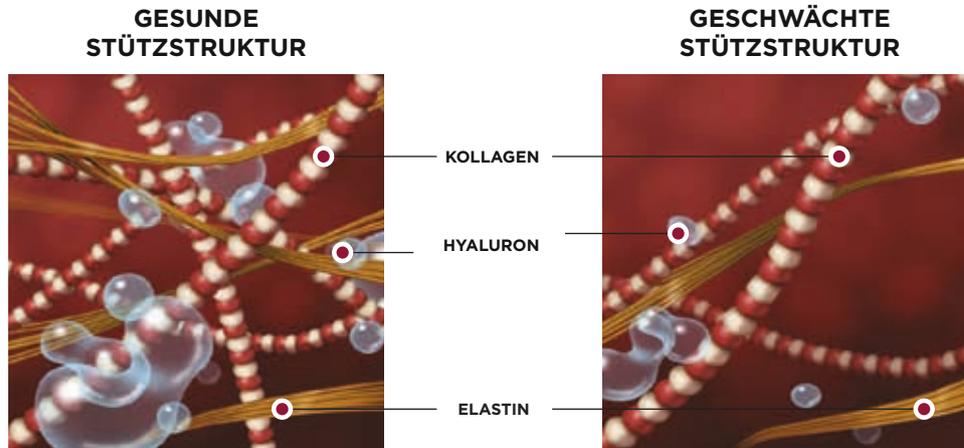

DIE BAUSTEINE DER HAUT

Kollagen:

Protein-Gerüst, das für Festigkeit sorgt und die Struktur der Haut unterstützt.

Elastin:

Als Hauptfaktor für die Elastizität der Haut trägt es dazu bei, dass diese straff aussieht und nicht erschlafft.

Hyaluron:

Befindet sich zwischen den Kollagen- und Elastinfasern, hilft bei der Feuchtigkeitsspeicherung und sorgt für Festigkeit.



GOOD AS GOLD

Ein Expertengremium aus erfahrenen, ästhetischen Ärzten hat Ultherapy® zum Gold Standard für die nicht-chirurgische Hautstraffung ernannt.³

Folgende Faktoren waren hierfür relevant:

- **Die patientenindividuelle Anwendung**
- **Der Wirkmechanismus**
- **Die zahlreichen klinischen Belege**
- **Die hohe Patientenzufriedenheit**

Nur Ultherapy® ermöglicht Echtzeit-Ultraschallbilder, um die Behandlungsschichten präzise auswählen zu können und optimale, individuelle Behandlungsergebnisse zu ermöglichen.³

Ultherapy® wird Jahr für Jahr mit diversen Branchen-Awards ausgezeichnet!




GESTRAFFTE HAUT OHNE CHIRURGIE. IST DAS ZU VIEL VERLANGT?

NICHT MIT **ULTHERAPY**[®]

- **Ultraschalltechnologie mit einem gut etablierten Sicherheitsprofil^{1,3,4}**
- **Das nicht-invasive Lifting-Verfahren mit FDA*-Zulassung aus den USA**
- **CE-zertifiziert in Europa**
- **Natürliche Ergebnisse**
- **Nicht chirurgisch, keine Ausfallzeit**

*Food and Drug Administration

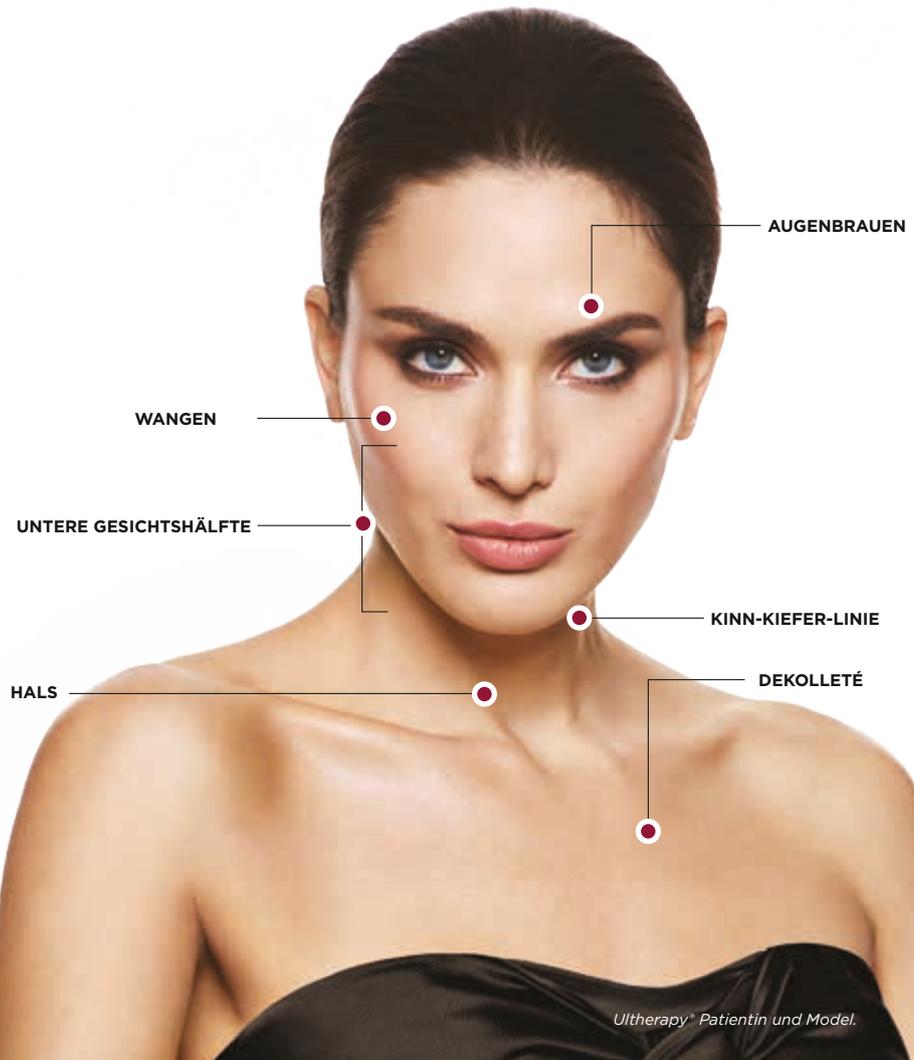

MERZ AESTHETICS[®]

GOLDSTANDARD

Ultherapy[®] Patientin und Model.