

# Photodynamische Therapie von Nagelpilz – sicher und sanft mit Licht.




**PACT®**

Hahn Medical Systems




# Effektive PACT®- Onychomykose-Therapie

# So funktioniert PACT®

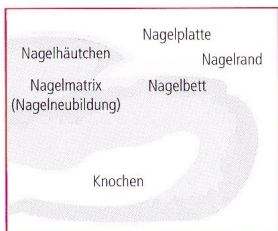


## 1.1 Der gesunde Nagel

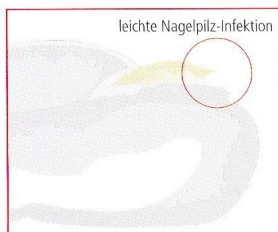


## 1.2 Der befallene Nagel (Onychomykose)

der Nagelpilz wächst in der Regel von der Nagelspitze zum Nagelbett.

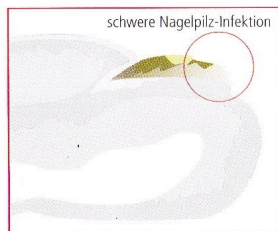


## 1.3 Der stark befallene Nagel

bei starkem Befall ist die Nagelmatrix mit betroffen.

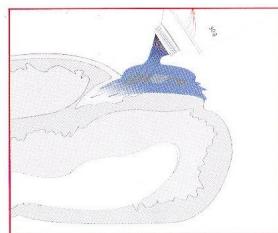


## 2. PACT® NagelpilzGel auftragen

nach Auftragen des Gels mit dem blauen Photosensitizer dringt der Farbstoff in die Nagelplatte ein. 10 min Einwirkzeit.

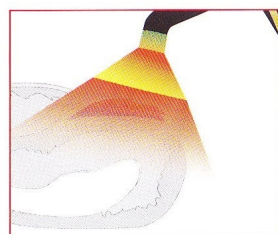

## 3. PACT® Bestrahlung

durch Belichten des eingefärbten Nagels werden die ursächlichen Pilze und andere Erreger zuverlässig abgetötet.

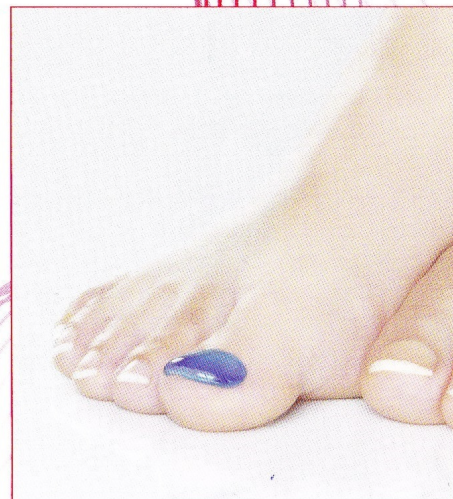

Das PACT® NagelpilzGel auf den befallenen Nagel auftragen und 10 Minuten einwirken lassen.



Belichtung mit dem PACT® MED Strahler für 9,5 Minuten.



Eine gesunde Nagelplatte kann nachwachsen.



# Moderne Nagelpilz Therapie

Neue Konzepte der Nagelpilz Therapie  
mit Farbstoff und Licht (PACT®)



## Nagelpilz Adé !



2 Monate nach PACT Behandlung



nach 7 Monaten PACT Behandlung