



## Cuando reciba la silla

Antes de utilizar la silla, realice una inspección visual para asegurarse de que

El contenido está completo como se ha descrito anteriormente

La silla no ha sufrido daños durante el transporte

El asiento, el respaldo y el armazón están completos y en buen estado Todas las ruedas funcionan correctamente, incluso al manipularlas

Los cinturones de seguridad funcionan bien

Los mecanismos se abren, se cierran y se accionan fácilmente cuando es necesario Los mecanismos de las guías se abren correctamente

Los cinturones de goma giran alrededor de las guías

Después de recibir la silla de evacuación, sáquela de la caja de cartón y fije el soporte de montaje a la pared - la silla debe colgarse en los soportes.

## Garantía

Si la silla de evacuación es inspeccionada y revisada al menos una vez al año (se requiere la documentación de la inspección), entonces tiene una garantía de cinco años contra materiales y mano de obra defectuosos.

Las piezas sujetas a desgaste o daños mecánicos o como resultado de vandalismo o uso inadecuado no están cubiertas por la garantía.

Las condiciones anteriores son condiciones estándar. Las disposiciones del contrato entre las partes se aplican a las condiciones acordadas individualmente.

## Montaje en la pared

La silla debe montarse en la pared en un lugar adecuado de acuerdo con las instrucciones de seguridad contra incendios desarrolladas o la auditoría de incendios.

Recomendamos que la silla de evacuación se monte en la pared a una altura suficiente para permitir la limpieza del suelo sin tener que retirar la silla de la pared.

Fije a la pared el soporte suministrado. Debe colocarse una cubierta protectora cuando la silla no esté en uso

## Información general de seguridad

Sólo los operadores debidamente formados y competentes deben manejar la silla. Deben someterse a una formación periódica en esta materia (se recomienda al menos 1 / año).

La silla debe utilizarse de acuerdo con su finalidad.

Nunca se debe superar la capacidad de carga máxima de 200 kg.

El operario nunca debe dejar al usuario desatendido en la silla.

El operario nunca debe soltar la silla al bajar escaleras.

El operario debe evitar los movimientos bruscos de la silla, ya que pueden dañar al usuario.

La inspección y el mantenimiento de la silla de emergencia sólo deben ser realizados por personas competentes.

La silla de evacuación puede ser manejada por una sola persona, pero se recomiendan dos operadores, especialmente si el usuario es mucho más grande y pesado que el

operador. El segundo operador puede mantener seguro al usuario de la silla, ayudar a abrir la puerta de la vía de evacuación y asistir en el manejo de la silla si es necesario. La silla de evacuación FALCON puede ser transportada por al menos dos personas, y cuando la persona transportada pesa más de 70 kg, se recomienda que la silla sea transportada por tres o cuatro personas.

Todos los operadores deben recibir una formación impartida por el formador autorizado por el fabricante. Los operadores deben estar en buena forma física, llevar calzado y ropa adecuados, estar preparados para manejar la silla en caso de emergencia, conocer y comprender los procedimientos y planes de evacuación.

## Elementos de la Silla



Productor: EnSafe Sp. z o.o.

Modelo: FALCON

Construcción: Aluminio/Acero

Capacidad máxima: 200 kg

1. Asa telescópica extensible  
La solución diseñada permite extraer el asa hasta la altura deseada.

2. Manual de fácil acceso  
El manual de instrucciones está situado en la parte posterior del reposacabezas, lo que lo hace visible para el operador durante el funcionamiento de la silla.

3. Barandillas plegables  
Se utilizan durante la evacuación horizontal, por ejemplo, en un pasillo, una habitación, etc.

4. Cinturón de seguridad  
Las dos filas de cinturones utilizadas garantizan la seguridad de la persona evacuada.

Opcionalmente, la silla puede estar equipada con un cinturón adicional para las piernas.

5. Reposapiés  
Antideslizante en la empuñadura de accionamiento y en el soporte inferior.

6. Asas de transporte  
La silla está equipada con asas de transporte.

7. Reposabrazos  
Opcionalmente, la silla puede estar


equipada con reposabrazos.

## Preparación para uso de la silla FALCON


### Preparing of the FALCON evacuation chair for use



### The stairs evacuation

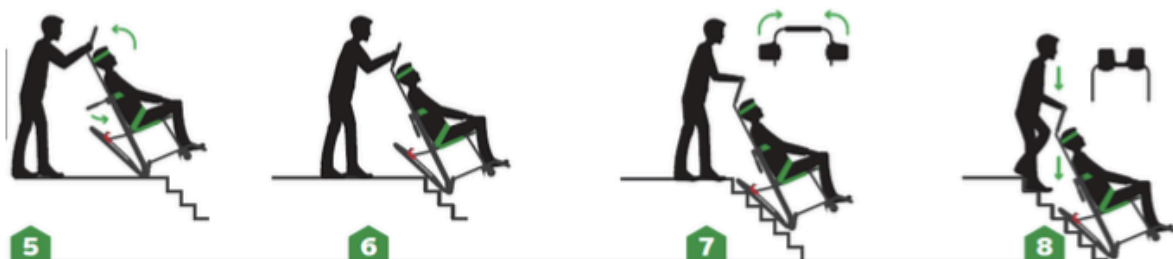

### Floor level evacuation

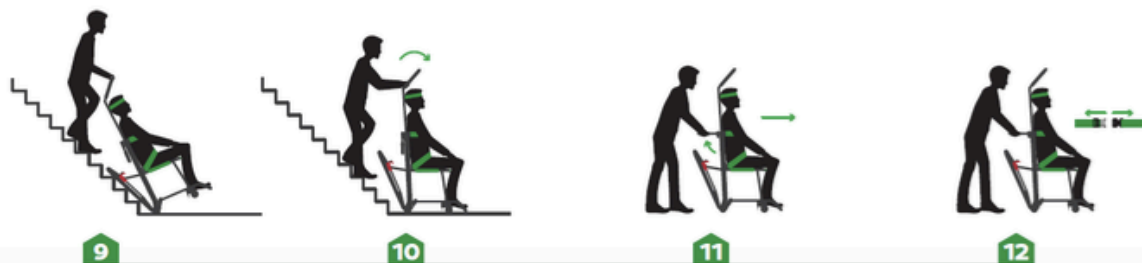

La silla de evacuación debe ser revisada al menos una vez al año por personal competente y debidamente formado para que la silla siga funcionando correctamente. Como se menciona en este manual, todos los operadores deben ser formados en el uso correcto del equipo. Hay dos sesiones de formación certificadas disponibles: la primera es una sesión de formación para el operador y la segunda es una sesión de formación para organizaciones más grandes que deseen formar a sus operadores en la empresa. Hay paquetes combinados de inspección y mantenimiento y de formación disponibles bajo petición.

## Información de contacto

Si desea información adicional o ayuda, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el equipo:

MAXPREVEN SL  
C/ Faisanes 5  
37900 Santa Marta de Tormes. Salamanca  
Tel: 923 994530  
info@maxpreven.com

# MAXPREVEN

Productos de entrenamiento  
y simulacro de emergencias

