

Pflegend Waschen ohne Wasser, Seife und Handtuch; eine effektive Lösung für eine komplette Körperwäsche.




Für gesunde Haut

Bei diesem Waschsystem wird weder Seife, noch Wasser benutzt. Wasser und Seife können die Haut austrocknen und zu Hautirritation oder Beschädigungen an der Haut führen. Die Lotion in unseren Waschhandschuhen hat einen hautneutralen pH-Wert und pflegende Substanzen, dies hilft die Haut gesund zu halten. Alle Lotionen sind dermatologisch bestätigt und enthalten keine Parabene oder Alkohol.

Noch mehr Vorteile

- Mehr Komfort (Erwärmen in der Mikrowelle oder im 12er oder 24er Wärmeschrank).
- Weniger physikalische Belastung für Patient und Pflegepersonal (Drehen, Heben usw.).
- Zeitersparnis gegenüber traditionellem Waschen mit Waschschiessel, Seife und Handtuch (Spülen und Abtrocknen ist nicht mehr nötig), keine Kosten für Einsammlung von Textilien und Textilreinigung.
- Hygienisch im Vergleich zu traditionellem Waschen mit der Waschschiessel, denn es reduziert das Kontaminationsrisiko beim Einsatz vom Waschschiema. Pro Körperbereich wird ein Waschhandschuh benutzt.

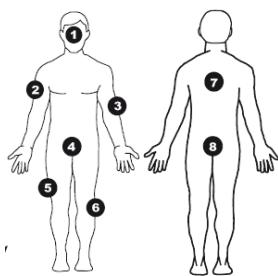

Wie funktioniert es?

Die Packung mit in Lotion vorgetränkten Waschhandschuhen aus hochwertigem 3D Vliesmaterial, werden kurz erwärmt (30 Sek. 700 W. in der Mikrowelle, oder im speziellem Wärmeschrank) sodass diese sich angenehm anfühlen. Danach wird der Patient nach dem Waschschiema gewaschen. Nachspülen und trocknen ist nicht erforderlich, denn die Lotion ist selbsttrocknend.

In jeder Packung befinden sich 8 Waschhandschuhe, genügend für eine komplette Körperwäsche. Die Waschhandschuhe können beidseitig verwendet werden. Nach Benutzung können die Waschhandschuhe im Restmüll entsorgt werden.

Die Shampoo-Hauben sind mit einer speziellen Tränkelösung imprägniert, und können in der Mikrowelle oder Wärmeschrank erwärmt werden für mehr Komfort. Die Haube mit den reinigenden und pflegenden Substanzen ist gebrauchsfertig und wird auf den Kopf aufgesetzt. Danach wird das Haar mit der Haube ca. 2 bis 3 Minuten massiert und wieder abgenommen. Das Haar wird eventuell kurz mit einem Handtuch getrocknet, und wie üblich gekämmt und in Form gebracht. Das Ausspülen der Lotion ist nicht erforderlich. Die Haube nach Benutzung im Restmüll entsorgen. Mit diesem System können Sie ohne großen Zeitaufwand die Haare gründlich und überall waschen.



Lieferprogramm:

Artikel	Beschreibung	St./Pack	Pack/Karton	Karton/Palette
20006	Innocare® feuchte Waschhandschuhe, Typ Jade, mit Parfüm	8	30	72
20007	Innocare® feuchte Waschhandschuhe, Typ Jade Neutral, ohne Parfüm	8	30	72
20008	Innocare® feuchte Shampoo Hauben, Typ Amber, mit Parfüm	1	24	72

