


1. Sie bekommen dafür eine Packung von unseren Mitarbeitern ausgehändigt.




2. Auf der Verpackung finden Sie eine Zahl. Diese Zahl übernehmen wir in unsere Liste und weisen dieser Ihren Namen zu. Sie benötigen diese Nummer in einem weiteren Schritt.

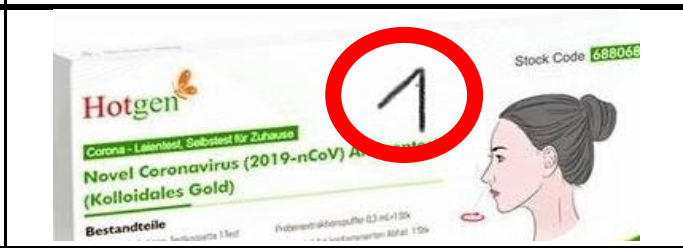


3. An der Teststation angekommen öffnen Sie bitte die Verpackung. Darin finden Sie folgendes:

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Probenahmerohr mit Verschlussklappe und Extraktionspuffer
3. Steriler Abstrichtupfer
4. Einwegbeutel für die Entsorgung
5. Gebrauchsanweisung

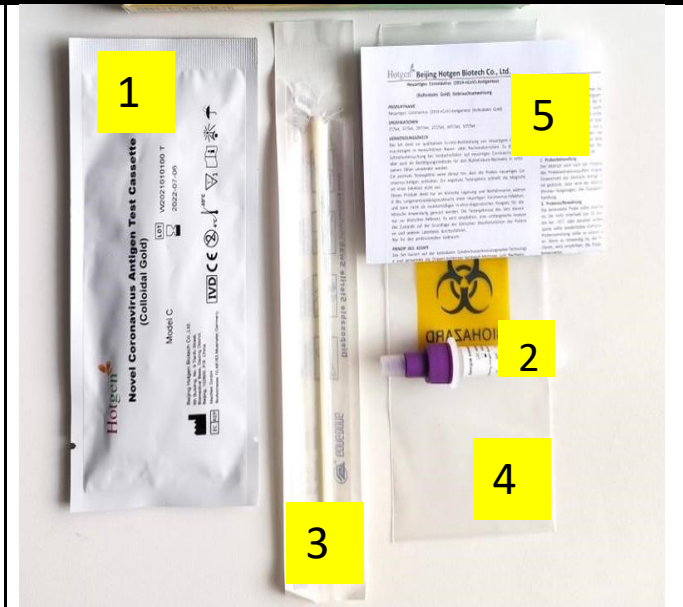

4. Schauen Sie sich dazu vorab ein Video an, oder folgendes Sie unserer Anleitung. **Bitte beachten Sie dennoch Punkt 13 hinsichtlich der Beschriftung Ihres Tests, dies ist im Video nicht erklärt.**

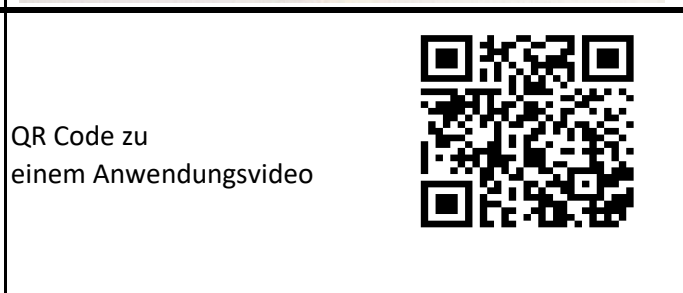


5. Desinfizieren Sie sich Ihre Hände. Beachten Sie dazu die Schritte einer hygienischen Händedesinfektion. Die richtige mänge Desinfektionsmittel ist erreicht, wenn die Hohle Hand gefüllt ist.



6. Entpacken Sie den sterilen Abstrichtupfer ohne dabei die wattierte Spitze zu berühren.




7. Führen Sie diesen mit dem Wattestäbchen voran 1,5 cm vorsichtig in ein Nasenloch ein, bis ein leichter Widerstand spürbar ist. Führen sie den Tupfer nicht tiefer ein, wenn sie starken Widerstand oder Schmerzen spüren. Mit mittlerem Druck den Abstrichtupfer mindestens 15 Sekunden lang 4 - 6 mal in einer kreisförmigen Bewegung entlang der inneren Nasenwand bewegen, um möglichst viele Zellen und Schleim aufzusammeln. Wiederholen Sie die Probenahme mit dem gleichen Abstrichtupfer im anderen Nasenloch.

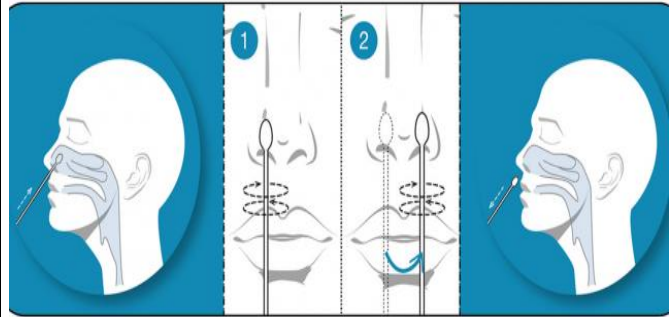


8. Öffnen Sie das Probenahmerohr an der großen Öffnung (Lila Kappe durch drehen).



9. Stecken den benutzten Abstrichtupfer mit der gesammelten Probe in das Rohr. Die Probe muss in der Flüssigkeit des Probenextraktionspuffers eingeweicht werden. Die Einweichzeit des Abstrichs beträgt mindestens 15 Sekunden, dabei muss der Abstrichtupfer mehrere Male gedreht und der Abstrichkopf 3 Mal gedrückt werden.

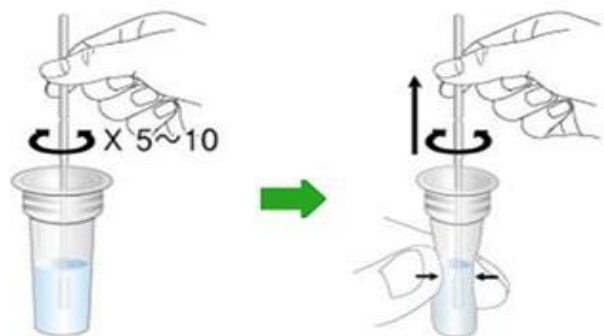

10. Das Probenahmerohr wird zusammengedrückt während der Abstrichtupfer herausgenommen wird. Anschließend wird das Entnahmeröhrchen mit der Verschlusskappe (Lila) wieder verschlossen.

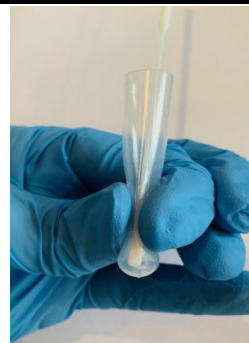

11. Packen Sie den benutzten Abstrichtupfer in die beiliegenden Plastiktüte für kontaminierte Abfälle.



12. Öffnen Sie den silbernen Aluminiumbeutel und legen Sie die Testkassette auf eine gerade Unterlage. Nach dem Öffnen des Folienbeutels sollte der Test innerhalb von 30 Minuten verwendet werden



13. Bitte schreiben Sie nun mit dem bereitliegenden permanent Marker die Nummer von Ihrer Verpackung gut leserlich auf den Test. Diese dient zur anonymen Erfassung Ihres Ergebnisses.



14. Öffnen Sie das Probenahmerohr an der kleinen vorderen Verschraubung und geben Sie **exakt 4 Tropfen** der behandelten Probe in das Probenloch (S) der Testkassette.



15. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände erneut bevor sie den Timer berühren!



16. Das Ergebnis nach dem Auftragen der Tropfen bei Raumtemperatur (10 bis 30 ° C) nach 15 Minuten beobachten. Das nach Ablauf von 30 Minuten angezeigte Ergebnis ist ungültig. Bitte Lassen Sie den Test auf der Teststation liegen. Sie finden dort ebenfalls Timer, diese können Sie nutzen. Bitte kleben Sie Ihren Test unter den entsprechenden Timer.



17. Nach dem Test packen Sie alle Bestandteile dieses Testss, bis auf die Testkassette, in die beiliegende Plastiktüte für kontaminierte Abfälle und entsorgen diese Tüte verschlossen im Abwurfbehälter.



Das Coronavirus kann nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden. Auch bei einem negativen Testergebnis sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten!



Positiv

Positiv: Im Beobachtungsfenster erscheinen zwei Farbbänder, d.h. eine rote oder magentafarbene Linie erscheint an der Position der Qualitätskontrolllinie (C-Linie) und der Erkennungslinie (T-Linie). Wenn das Testergebnis der Probe positiv ist, liegt ein Corona-Virus vor.



Negativ

Negativ Eine rote oder magentafarbene Linie erscheint an der Position der Qualitätskontrolllinie (C-Linie) im Beobachtungsfenster, und an der Position der Testlinie (T-Linie) erscheint keine Linie, was anzeigt, dass die Testergebnisse der neuen Coronavirus-Antikörper in der Probe negativ waren oder die Konzentration unter der Nachweisgrenze des Kits lag.



Ungültig

Ungültig An der Position der Qualitätskontrolllinie (Linie C) im Beobachtungsfenster wird keine Linie angezeigt, was darauf hinweist, dass der Test ungültig ist. Die Probe sollte erneut entnommen und erneut getestet werden.

QR-Code zur Gebrauchsanleitung von Hotgen:



