

# PadScan HD 5

**Caresono**  
Healthcare through innovation

## Guida Rapida

## Bladder Scanner

## Guida Rapida

## PadScan HD 5

## Bladder Scanner

- 1 Premere il pulsante ON / OFF per l'accensione e spegnimento dello strumento.**



**2 Accesso dell'operatore.**

- a) Il device HD 5 dispone di un sistema di accesso dell'operatore che consente solo agli operatori autorizzati ad effettuare l'accesso.  
b) È possibile aggiungere un nuovo operatore con il nome dell'account e la password nel menù SETUP.



**3 Inserire i dati del paziente**

- a) Toccare il tasto paziente per entrare nel sistema di gestione del paziente.  
b) Selezionare il sesso del paziente toccando l'icona di Gender - Sesso. Selezionare l'icona "Child" - Bambino per eseguire la scansione di un bambino piccolo sotto 120 centimetri di altezza e di peso inferiore a 25 kg.  
c) Usare la tastiera grafica per immettere il nome del paziente / ID / età



**4 Preparare il paziente**

- a) Far sdraiare il paziente in posizione supina con i muscoli addominali rilassati.  
b) Spalmare una quantità abbondante di gel sulla linea mediana dell'addome del paziente, a circa tre centimetri sopra l'osso pubico.



**5 posizionare la sonda verso la vescica**

- a) Mettersi al lato destro del paziente.  
b) Posizionare la sonda sul gel e assicurarsi che il pulsante della sonda si trovi rivolta direttamente verso la testa del paziente.  
c) Inclinare la sonda leggermente verso il coccige del paziente.



**6 Premere il pulsante Scan (scansione)**

- a) Premere il pulsante sulla sonda per avviare la scansione ad ultrasuoni per individuare la vescica.  
b) Assicurarsi che l'immagine ecografica della vescica sia più grande possibile e centrata. Una linea verde farà da guida aiutando a centrare la vescica.  
c) Quando si trova l'immagine ideale della vescica, premere di nuovo il tasto della sonda. L'HD 5 inizierà il calcolo automaticamente. Assicurarsi che la posizione della sonda rimanga ferma durante il calcolo.  
d) Quando si sente un 'bip', il calcolo è finito. Il risultato del volume verrà visualizzato.



**7 Salvare, rivedere e stampare i risultati dell'esame**

- a) Toccare SAVE (salva) per salvare la scansione corrente.  
b) Premere UP/DOWN (su / giù) per rivedere due qualsiasi dei 12 piani della scansione corrente.  
c) Toccare il pulsante REVIEW (rivedere) per accedere alla gestione ed inserire i dati paziente per rivedere le immagini ed i risultati di tutte le scansioni salvate. (Prima è necessario salvare la scansione corrente, e dopo si potrà rivedere.)  
d) Toccare il pulsante PRINT (stampa) per stampare scansione corrente. È inoltre possibile stampare le altre scansioni salvate dalla gestione dei dati paziente.



**8 Fine esame**

- Una volta completata la scansione, pulire dal gel sia il paziente che la sonda.



Caresono Technology Co., Ltd (Shenzhen)  
BF13, No. 1119Nanhai Rd Nanshan, Shenzhen 518067, China  
Tel: +86-755-86397862 Fax: +86-755-86396909 Email: info@caresono.com  
All rights reserved.

